

Desinfisering med  
Nocospray robot pågår!

# INGEN ADGANG!

før «Trygt å gå inn» klokkeslett er passert!


Rom nr.: \_\_\_\_\_

Rom volum: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Middel som anvendes:  
**Hydrogenperoksid 7,9 %**  
**NOCOLYSE Food**



Innstilling av robot:

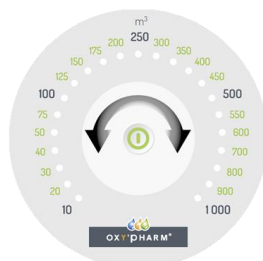

= Rom volum x 5

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Klokkeslett for  
opstart av  
robot: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

timer                      minutter

Innstilling av robot:



m<sup>3</sup>

Diffusjonstid:

Timer / minutter

0 - 250

-- / 15 min

251 - 500

-- / 30 min

501 - 750

-- / 45 min

751- 1000

1 time / --

Diffusjons tid:  
(se tabell til  
venstre)



\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

timer

minutter



Kontakt tid:  
(minimum)

\_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 00 \_\_\_\_\_

timer

minutter

## TRYGT Å GÅ INN

=



klokkeslett:

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Signatur: \_\_\_\_\_