

Desinfisering med
Nocospray robot pågår!



INGEN ADGANG!



før «Trygt å gå inn»  klokkeslett er passert!

Rom nr.: _____

Rom volum: _____ m³

Middel som anvendes:
Hydrogenperoksid 6 %
NOCOLYSE



Innstilling av robot:



= Rom volum x 5

_____ m³

Klokkeslett for
oppstart av
robot: _____ : _____

timer minutter

Innstilling av robot:

Diffusjonstid:



m³

Timer / minutter

0 - 250

-- / 15 min

251 - 500

-- / 30 min

501 - 750

-- / 45 min

751- 1000

1 time / --

Diffusjons tid:
(se tabell til
venstre)



_____ / _____
timer minutter

Kontakt tid:
(minimum)



_____ 2 _____ / _____ 00 _____
timer minutter

TRYGT Å GÅ INN



klokkeslett:

_____ : _____

Dato: _____ Signatur: _____