

NOCOSPRAY

Instrukcja obsługi



Przeczytaj dokładnie całą instrukcję obsługi dołączonej do ROBOTA NOCOSPRAY.



1 Używaj rękawiczek i okularów ochronnych w kontakcie z każdym preparatem używanym do robota.



2 Sprawdź, czy butelka zawiera wystarczającą ilość preparatu. Zaznacz poziom przed rozpoczęciem procedury i sprawdź po.



3 Nakręć dyszę rozpylającą na butelkę. Zachowaj korek.



4 Wciśnij dyszę rozpylającą z butelką na miejsce w robocie. Sprawdź, czy dysza jest dobrze zamocowana.



5 Ustaw robota Nocospray na stabilnej powierzchni. Wybierz narożnik, aby uzyskać optymalny efekt.



Nocolyse One Shot:
Objętość pomieszczenia (m³) x3

Nocolyse Neutral:
Objętość pomieszczenia (m³) x1

6 Ustaw odpowiednią objętość pomieszczenia. Ustawienie zależy od wielkości pomieszczenia i rodzaju użytego preparatu.



7 Naciśnij start na środku tarczy numerycznej. Robot wydaje sygnał dźwiękowy przez 15 sekund i uruchamia się automatycznie.

Opuść pomieszczenie!



Nocolyse One Shot: **2 godziny** czas kontaktu

Nocolyse Neutral: **30 minuty** czas kontaktu

8 Pomieszczenie musi być zamknięte podczas dyfuzji i przez cały czas kontaktu. Zawieś na drzwiach plakat z ostrzeżeniem: «Zakaz wstępu!»



9 Odkręć butelkę. Zakręć ponownie korek. Oplucz dyszę natryskową i wąż pod wodą. Wciśnij dyszę z powrotem na miejsce w robocie.