

NOCO SPRAY

መምርሒታት



ምስቲ ናኮስፕራይ ሮቦት ዝመጽእ ምርሒ ብጥንቃቄ ኣንብቦ



1 ኩሎም ንሮቦት ዝውዕሉ ከሚካላት ኣብ ኣትሕዙሉ እዋን ናንቲን መከላኸሊ ዓይኒን ምጥቃም




2 እቲ ጥርመ-ዝ/መትሓዚ እኹል ከሚካል ከምዘለዎ ኣረጋግጽ። ቅድሚ እቲ ኣገባብ ነቲ ደረጃ ምልክት ግበረሉ። ድሕሪኡ ድማ




3 ነቲ መንጸጊ ኣብቲ መትሓዚ ከሚካል ጸብቅ ጌርካ ኣትሕዙ። ነቲ መኸደጊ ከኣ ኣብ ጸብቅ ቦታ ኣቀምጦ።



4 እቲ መንጸጊ ኣብቲ ናኮስፕራይ ሮቦት-በምጥቀቅ ኣብ ቦታኡ ኣትሕዙ። እቲ መንጸጊ ውሑስ ምዃኑ ኣረጋግጽ።

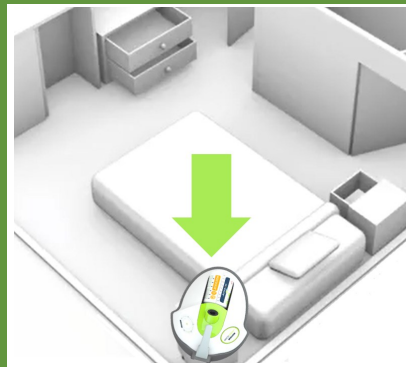


5 ነቲ ናኮስፕራይ ሮቦት ኣብ ጽኑዕ ቦታ ኣቀምጦ። ንዝበለጸ ውጽኢት ኣብ ኩርናዕ ምቅማጥ ይምረጽ።

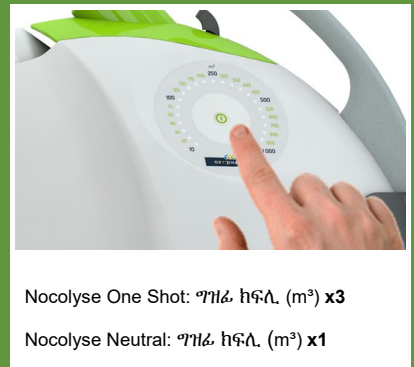

Nocolyse One Shot: ግዝፊ ክፍሊ (m²) x3
Nocolyse Neutral: ግዝፊ ክፍሊ (m²) x1



7 ኣብ ማእከል ቁጽርታት ትርካብ «start» ትብል ጠውቅ። እቲ ሮቦት ከፍ ክልኢት ድምጺ ይገብር

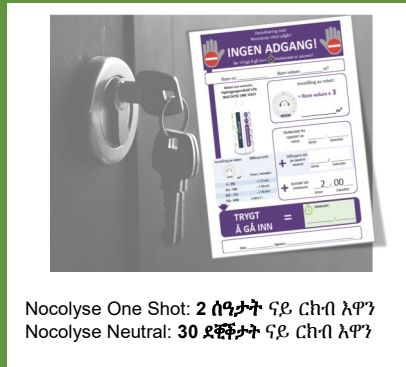

Nocolyse One Shot: **2 ሰዓታት** ናይ ርክብ እዋን
Nocolyse Neutral: **30 ደቂታት** ናይ ርክብ እዋን

8 እቲ ክፍሊ ኣብ እዋን ምዘርጋኡን ኣብ መሉእ ናይ ርክብ ግዜን ክዕጸ ኣለዎ። «ingen adgang» ዝብል ፖስተር ከኣ ኣብ ማዕገስ ስቀል።



9 ነቲ መትሓዚ ከሚካል ፍትሓዮ። ቦቲ መዕጸዊኡ ዕጸዎ። ነቲ መንጸጊን ቱቦን ብማይ ምሕጻብ። ነቲ መንጸጊ ኣብቲ ሮቦት ኣብ ቦታኡ ጠዊቕካ ምእታው

ኣብቲ ክፍሊ ምውጻእ



Adresse: Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva
Telefon: 32 83 59 00
E-mail: info@bragemedical.no
Web: www.bragemedical.no