

NOCOSPRAY-2 Desinfeksjonsrobot Bruksanvisning

①

Benytt hansker og øyebeskyttelse ved håndtering av flytende desinfeksjonsmidler!



②

Regn ut romvolum og forbruk. Sjekk at flasken inneholder tilstrekkelig mengde løsning og merk av nivået! Kontroller og merk av forbruk også etter avsluttet desinfeksjon.



③

Skrusprede-dysen fast på flasken.

OBS! Ta vare på flaskekorken.



④

«Klikk» sprede-dysen med flasken på plass i NOCOSPRA[®] roboten. Sjekk at dysen sitter fast.




⑤

Plasser NOCOSPRA[®] roboten på fast underlag i et hjørne av rommet for optimal effekt.



⑥

Skrupå hovedbryter på baksiden av apparatet. Bryteren skal lyse rødt.

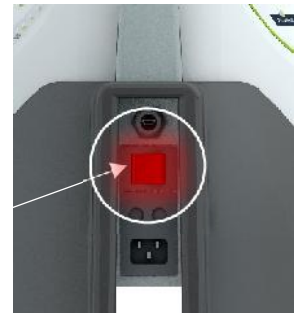

⑦

Innstill det ønskede rom-volum.

Nocolyse OneShot:
romvolum x3
Nocolyse/Nocodor:
romvolum x1



⑧

Trykk på start i senter av tallskiven. Roboten piper i 15 sekunder og starter automatisk. Forlat rommet!



⑨

Etter endt diffusjon, skal rommet fortsatt være låst i kontakttiden.

Kontakt-tider:

- Nocolyse/Nocodor: 30 min.
- Nocolyse One Shot: 2 timer



⑩

Løsne flasken fra roboten og skrupå flaskekorken. Skyll godt sprededysen og slangen i rennende vann. Klikk sprededysen på plass i roboten

