

Desinfisering med  
Nocospray robot pågår!



# INGEN ADGANG!



før «Trygt å gå inn»  klokkeslett er passert!

Rom nr.: \_\_\_\_\_

Rom volum: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Middel som anvendes:  
**Hydrogenperoksid 12%**  
**NOCOLYSE ONE SHOT**



Innstilling av robot:



= Rom volum x **3**

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Klokkeslett for  
oppstart av  
robot: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

timer                      minutter

Innstilling av robot:



m<sup>3</sup>

Diffusjonstid:

Timer / minutter

0 - 250

-- / 15 min

251 - 500

-- / 30 min

501 - 750

-- / 45 min

751- 1000

1 time / --



Diffusjons tid:  
(se tabell til  
venstre)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

timer

minutter



Kontakt tid:  
(minimum)

**2** / **00**

timer

minutter

## TRYGT Å GÅ INN



klokkeslett:

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Signatur: \_\_\_\_\_