

Bruk av insektdrepende middel med  
Nocospray robot pågår!

# INGEN ADGANG!

før «Trygt å gå inn» klokkeslett er passert!

Rom nr.: \_\_\_\_\_

Rom volum: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Middel som anvendes:

**OXYPY**



**NB! Rist flasken før bruk!**

Innstilling av robot:



= Rom volum

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Klokkeslett for  
oppstart av  
robot: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

timer minutter

Diffusjons tid:  
(se tabell til  
venstre)



\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

timer minutter

Kontakt tid:



\_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 00 \_\_\_\_\_

timer minutter

Utlufting



\_\_\_\_\_ / 10

timer minutter

Innstilling av robot:

Diffusjonstid:



m<sup>3</sup>

Timer / minutter

0 - 250

-- / 15 min

251 - 500

-- / 30 min

501 - 750

-- / 45 min

751 - 1000

1 time / --

**TRYGT  
Å GÅ INN**



klokkeslett:

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Signatur: \_\_\_\_\_