

# TEKNISK BULLETIN

INFORMATION FRÅN VADEXIT

---

2003-09-28

Sid 1/1

## Perasafe och lukt

### **Vad är det som luktar?**

Lukten kommer från ättiksyra och perättiksyra, som förekommer i Perasafe-lösningen i mycket låga halter. De utgör komponenter i en ständigt pågående jämviktsreaktion.

### **Varför luktar Perasafe mer när det används på en yta än i ett kar?**

Vid användning av Perasafe i ett kar för desinfektion av t.ex. instrument är lukten knappt märkbar, i vart fall ej besvärande. När lösningen fördelas över en yta ökar förhållandet yta/volym; luktångorna har därför en större yta, varifrån de kan lämna lösningen. Lukten kan då uppfattas som besvärande.

### **Kan lukten vara skadlig för den som inandas den?**

Det finns inga gränsvärden för perättiksyra i gasform, däremot för väteperoxid och ättiksyra. Perasafe har vid ett flertal tillfällen testats med avseende på dessa två komponenter. De halter som uppmäts har inte legat i närheten av de uppsatta gränsvärdena. Slutsatsen är att lukten är ofarlig.