

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA

Nr 3

1997-10-13

Sid 1/1

VirKon

DESINFEKTION AV TEXTILT TVÄTTGODS

Kontaminerade textilier tvättas i normalfallet rena, varvid tvättmedel och hög temperatur på ett effektivt sätt tar om hand närvarande mikroorganismer. Vissa textilier tål dock inte att utsättas för höga temperaturer. I sådana fall kan VirKon användas för fördesinfektion av textilier innan de maskintvättas.

Vår rekommendation är blötläggning av textilierna i en 1 % VirKon-lösning i 10 minuter, varefter de tvättas i maskin som vanligt. Efter denna blötläggning är de mikroorganismer som fanns i tvättgodset oskadliggjorda, vilket gör det möjligt att tvätta i så låg temperatur som 30° C. När textilierna tas upp ur desinfektionslösningen har de ofta tagit färg av lösningen och kan därför vara rosafärgade. Färgen försvinner dock i samband med tvättningen.