

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA

Nr 14

1995-05-15

Sid 1/1

VirKon BRUKSLÖSNING

HANTERING OCH SÄKERHET

Desinfektionsmedlet Virkon i brukslösning är tämligen harmlöst; visserligen ska Virkon i koncentrerad pulverform hanteras med respekt (genom att använda Virkon i vattenlöslig doseringspåse när man bereder brukslösningen eliminerar man de risker pulverhanteringen medför), men Virkon i 1 % brukslösning är skonsamt för användaren. Den har testats och klassificerats som icke-irriterande för hud och ögon, ej hudsensibiliserande och har mycket låg oral toxicitet (=giftighet i samband med förtäring).

Trots att Virkon i färdigblandad brukslösning är tämligen harmlöst är det klokt att iaktta normal försiktighet:

SÅ HÄR HANTERAR DU VIRKON-LÖSNINGEN SÄKERT

- Undvik att i onödan exponera huden och se till att du inte får stänk i ögonen.
- Använd skyddshandskar när du desinfekterar, främst för att skydda dig mot kontaminerande mikroorganismer.
- Undvik att hantera brukslösningen i sprayform.

OM DU UPPLEVER OBEHAG AV KONTAKT MED VIRKON

<u>Om detta händer</u>	<u>...ska du göra följande</u>
Virkon-lösning på huden	Skölj med vatten
Stänk av Virkon-lösningen i ögonen	Skölj ögonen med vatten om det svider
Förtäring av Virkon-lösning	Drick ett par glas vatten.

