



1. Koble til strømkabel, men la rød hovedbryter være slått av (lampen i rød bryter er slukket).



2. Hold fjernkontroll tett inntil robot og hold den grå knappen inne til grønn lampe blinker.

NB! Se til at ingen andre roboter er i nærheten og tilkoblet strøm samtidig.



3. Fortsett å hold knappen inne, samtidig som rød hovedbryter slås på. Rød lampe lyser.



4. Fjernkontroll skal blinke hurtig samtidig som robot avgir signal. Fjernkontroll og robot er nå paret sammen.

