

A

ARMERT TUPP

En wire er oftest bygd opp av en kjerne med en omsluttende coil som forenes ytterst med en halvkule i stål. De ulike delene av konstruksjonen er loddet sammen. Lengden på loddingen varierer avhengig av hvilke egenskaper man ønsker i wiren.

I en armert tupp (som på en Halberd wire) strekker loddingen seg hele veien fra halvkulen til den pre-formede bøyen (45°). Dette sikrer at wiren beholder den definerte bøyen i møte med okklusjonen.

