

G

GUIDE EXTENSION KATETER


Et Guide Extension kateter består av et ca. 120 cm langt, proksimalt stålskaft koblet til et ca. 25 cm langt RX (Rapid Exchange) kateter med ytre diameter som passer inn i et vanlig føringskateter. Guide Extension kateter finnes i ulike diametre tilpasset ulike føringskatetres innerdiametre. Bruken av disse katetrene har vært spesielt nyttig i prosedyrer hvor vanlig føringskateter av ulike årsaker ikke gir optimalt støtte. Katetrene er også egnet til levering av f.eks. stenter og ballonger i kronglete og forkalkede kar. De spiller også en viktig rolle i komplekse intervensjoner som involverer kroniske totale okklusjoner og lange venegraft med utfordrende vinkler. Katetrets tynnere lumen muliggjør visualisering med bruk av mindre kontrastvolum og lavere injeksjonshastighet.




BRUKSOMRÅDER:



Coaxial alignment and
backup support

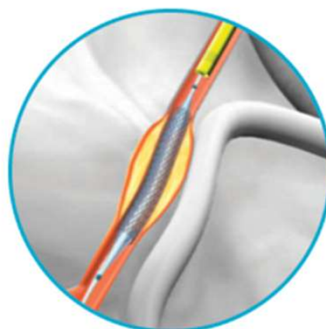

Deep-seating for
distal device delivery

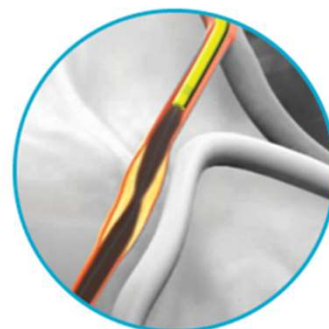

Selective delivery of
contrast