


T

TIP FORCE / LOAD

Tip Force (Tupp-vekt) er et mål for hvor stor kraft som skal til for å bøye tuppen på en wire. Jo stivere enn wire-tupp er, desto mer kraft trengs for å bøye den. Tupp-vekt kan måles på ulike måter av de enkelte produsenter. Likevel gir det en god indikasjon å kjenne til hvordan de ulike wires forholder seg til hverandre.

I eksempelet under holdes wiren fast 10 mm fra enden og føres ned mot en vekt. Etter hvert som kraften øker, bøyer wiren seg. Til slutt kollapser den og kraften mot vekten avtar. Det høyeste utslaget på vekten blir brukt for å angi Tip Force. Måleenheten som benyttes uttrykkes som «gf» = Gram Force.

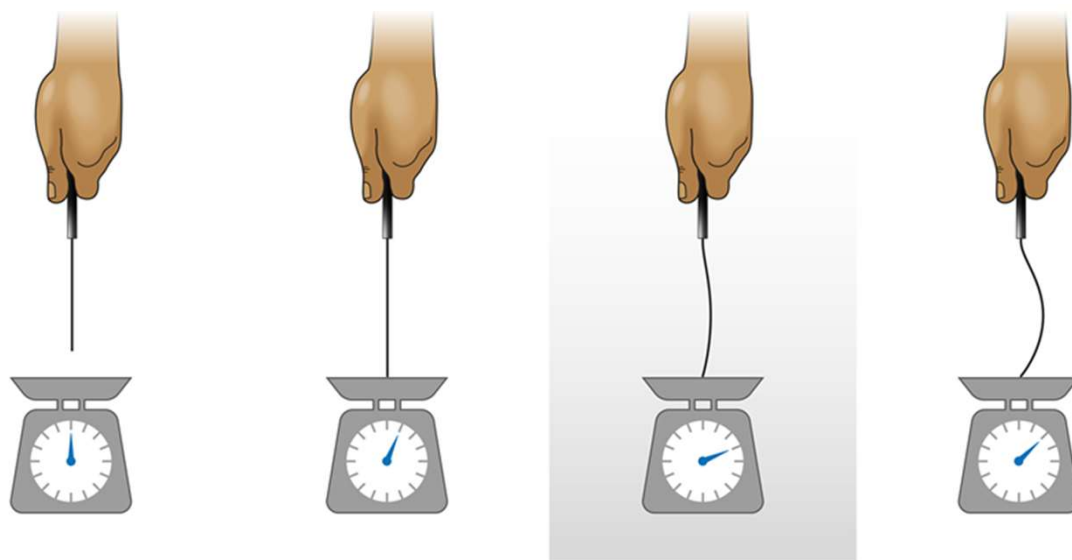

Høyeste utslag på vekten blir registrert som «Tip Force»