

VIRKON

Rely+On™ VirKon™

Blanding og bruk



1 Velg 0,5 l eller 1 l flaske. Fyll blandeflasken med lunkent vann.



2 Tilsett tablett(er):
1 tablett til 0,5 l flaske
2 tabletter til 1 l flaske...



...eller tilsett pulver:
1 dosepose til 1 l flaske
1 måleskje til 1 l flaske.



3 Vend flasken to-tre ganger og vent tre-fem minutter til tablett(en) / pulveret er helt oppløst.



4 Løsningen er nå klar til bruk. Merk etikett med dato og tidspunkt for utblanding.

Riktig beskyttelse:

Benytt øyebeskyttelse, hansker og åndedrettsvern.



Riktig blanding:

Les pakningsvedlegget og følg blandeanvisningen. Når pulveret er helt oppløst og løsningen får en rosa farge, er den klar til bruk.

Desinfeksjon av overflater:

- Påfør VirKon med godt fuktet klut, svamp eller lignende.
- Bearbeid flaten med klut, svamp godt fuktet med VirKon!
- La VirKon virke i **10 min.**
- Tørk over flaten for å fjerne evt. rester etter desinfeksjonen.

Synlig forurensning/ flekk-desinfeksjon:

- Fjern først forurensningen på foreskrevet måte, gjerne med en klut fuktet med VirKon. Foreta så desinfeksjon som beskrevet ovenfor.

Synlig forurenset utstyr:

- La utstyr ligge i VirKon i **30 min.**

Virketid:

Virketid er 10 minutter uavhengig av type mikroorganismer. Forurenset utstyr skal ligge i løsningen i 30 minutter.



Effekt:

VirKon har dokumentert effekt på:
Bakterier, Virus og Sopp

**Ikke godkjent for bruk ved TBC/
mykobakterier eller sporer (Cl.Difficile).**

Bruksløsning:

Konsentrasjon 1%
pH 2,6
Lukt: svak
Farge: Rosa. Fargen indikerer god utblanding, men er ingen indikator for holdbarhet/effekt.

Holdbarhet:

5 døgn fra tidspunkt for utblanding.

Materialpåvirkning:

VirKon er testet overfor en lang rekke materialer uten påvist skade eller materialpåvirkning. På grunn av lav pH er VirKon ikke egnet til visse legeringer som inneholder aluminium eller kobber (finnes blant annet, i visse endoskop).

Avfall:

Brukt løsning kan helles direkte i avløp. Skyll etter med vann.