

NOCOSPRAY BRUKSANVISNING

LES NØYE KOMPLETT BRUKERMANUAL SOM FØLGER MED NOCOSPRAY ROBOTEN!



1 Bruk hansker og øyebeskyttelse ved håndtering av all kjemi som benyttes til roboten.



2 Sjekk at flasken inneholder tilstrekkelig mengde kjemi. Merk av nivået *før* og sjekk forbruk *etter* prosedyren.




3 Skru sprededyse fast på flasken.
Ta vare på korken.



4 Klikk sprededyse med flasken på plass i Nocospray roboten. Sjekk at dysen sitter fast.



5 Plasser Nocospray roboten på et fast underlag. Velg et hjørne for optimal effekt.

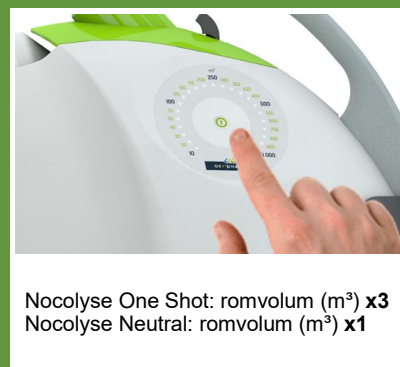

Nocolyse One Shot: romvolum (m³) x3
Nocolyse Neutral: romvolum (m³) x1

6 Innstill korrekt romvolum. Innstilling avhenger av rommets størrelse og type kjemi som benyttes.



7 Trykk start i senter av tallskiven. Roboten piper i 15 sekunder og starter automatisk.

Forlat rommet !



Nocolyse One Shot: **2 timer** kontakttid
Nocolyse Neutral: **30 min.** kontakttid

8 Rommet skal være lukket/låst under diffusjonen og i hele kontakttiden.

Heng opp dørplakat med varsel om «Ingen adgang!».



9 Løsne flasken. Skru på korken igjen. Skyll sprededyse og slange under vann. Klikk dysen tilbake på plass i roboten.