

LES NØYE KOMPLETT BRUKERMANUAL SOM FØLGER MED GLOSAIR ROBOTEN!




1 Bruk hansker og øye-
beskyttelse ved hånd-
tering av alle midler som
benyttes til roboten.




2 Koble til strøm og skru på
hovedbryter.




3 Ved behov; fjern tom
patron og plasser ny
patron i beholderen.

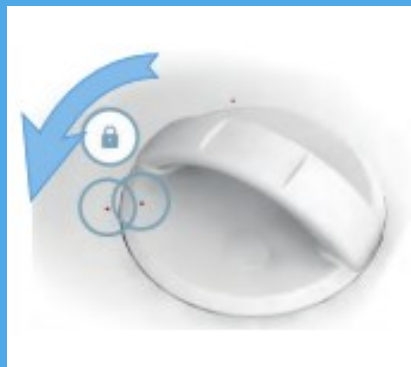


4 Drei håndtaket mot lukket
hengelås-symbol. De to
røde punktene må være
på linje med hverandre.

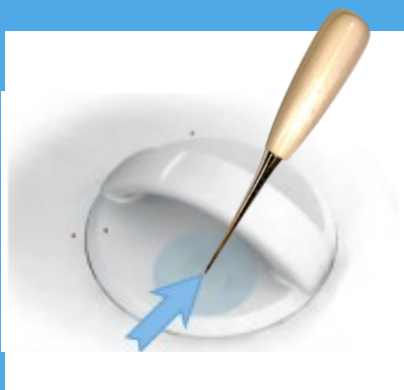


5 Stikk hull på patronen på
angitt punkt.
Vent 5 minutter til
skjermen bekrefter at
kammeret er tømt.

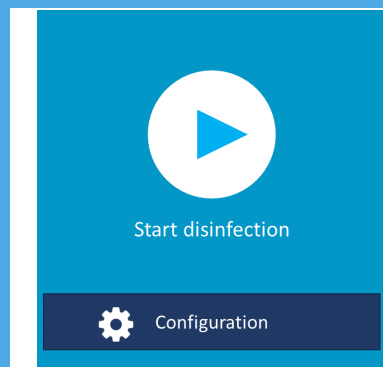

6 Trykk på blå pil med tekst:
«Start disinfection»

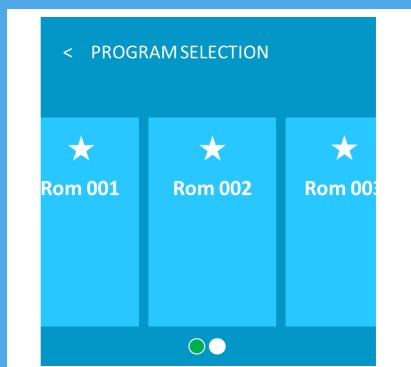

7 Velg ett av de
forhåndsprogrammerte
romvalg...

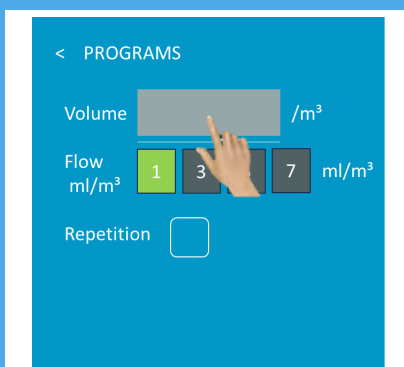

8 ...eller velg ønskede
parametere ved manuell
programmering.
Trykk start.



9 Rommet skal være lukket/
låst under diffusjonen og i
hele kontakttiden.

Heng opp dørplakat med
varsel om
«Ingen adgang!».

Forlat rommet !