




# BRUKSANVISNING

## Nocobox

Nocobox inneholder et næringsstoff som fremmer veksten av bakterier og brukes til å sjekke resultatene oppnådd med Nocotechs biodesinfeksjonssystemer.

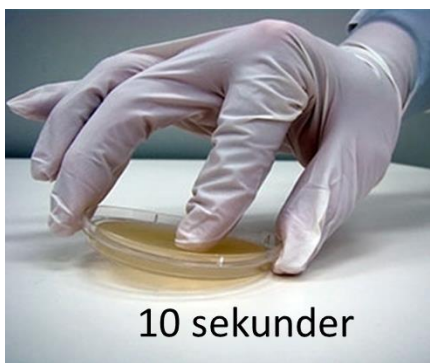

10 sekunder

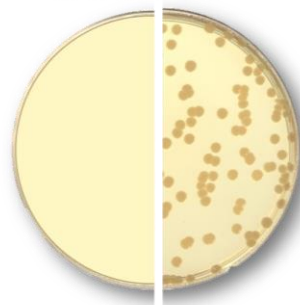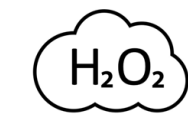

**1** Åpne en pakke med to skåler. Legg begge skålene mot et underlag (f.eks. pc-tastatur). Vent i 10 sekunder.

**2** La den ene skålen ligge i rommet under desinfeksjon. Den andre skålen er til kontroll og skal ikke utsettes for gass.

**3** La begge skåler ligge i romtemperatur i 48 timer. Sammenlign de to skålene!