

NOCO SPRAY

**Desinfiser et helt rom og inventar
ved å trykke på en knapp!**

Kompakte og svært brukervennlige desinfeksjonsroboter.
Tilfredsstiller alle krav i norsk standard;
NS-EN 17272:2020.



Nocospray 2

- Behandler rom opp til **1000 m³**.
- Gir økt sikkerhet og en enklere hverdag.
- Rask og økonomisk.
- Kan også brukes sammen med insektdrepende midler og til fjerning av ubehagelig lukt.
- Spesialmiddel til flater i kontakt med mat.
- Vekt 5,9 kg.



Nocospray Kube

- Til små rom; sikkerhetsbenker, LAF-benker, isolatorer, kjøleskap m.m.
- Batteri-drevet, oppladbar.
- Volumer fra **0,1 m³-10m³**.
- Vekt 3,3 kg.



KONSEPT:

Nocospray tilhører en familie av desinfeksjonsroboter som bygger på det gjennomprøvde Nocotech konseptet fra den franske produsenten Oxypharm. Ved hjelp av en jet-turbin omdannes væske (Hydrogenperoksid/Nocolyse) til hydroksylradikaler og tilintetgjør alle typer mikroorganismer. Den særdeles effektive og hurtige spredningen av gass, **HPV** (Hydrogen Peroxide Vapour), sikrer god effekt og krever minimalt med forberedelser. Nocotech konseptet tilfredsstiller alle kravene i den europeiske og norske standarden; **EN 17272:2020**. Nocolyse i kombinasjon med Nocospray er også godkjent av **Statens Legemiddelverk**. Nocospray/Nocolyse er effektiv mot alle typer bakterier, virus, sopp og sporer.

BRUKSOMRÅDER:



FORDELER:



Rask klargjøring og kort diffusjonstid. Kun 30 minutters virketid ved forebyggende behandling.



Svært enkel i bruk. Still inn romvolum og trykk start.



Ikke-allergent produkt som brytes ned til oksygen og vann.



Fjerner alle typer mikroorganismer med opp til 6-logs reduksjon.



Veier bare 5,9 kg. Kan likevel desinfisere rom opp mot 1000 m³. (Nocospray2)



Veldokumentert og brukervennlig system til en av markedets laveste priser.

KLAR PÅ 1-2-3:

Skru dysen fast til flaske med ønsket desinfeksjonsløsning/insekticid og klikk dysen på plass i maskinen. Still inn romvolum og trykk start. Forlat rommet. Nocospray-roboten starter etter 15 sekunder og stopper automatisk når rommet er ferdigbehandlet. Det er i de aller fleste tilfeller ikke nødvendig å stenge ventilasjonen eller tape/forsegle dører.



HVER KVADRATCENTIMETER BEHANDLES:

Gassen (HPV) som Nocospray produserer kommer til overalt. Åpne skapdører og dra ut skuffer før behandling, og gassen vil desinfisere innsiden. Gardiner kan henge, og disse vil også bli desinfisert.

REGISTRERING:

Ved hjelp av USB-kabel kobles Nocospray opp mot en datamaskin. Programmet, som medfølger, registrerer utførte behandlinger.

ENKELT VEDLIKEHOLD:

Maskinen har en oversiktlig oppbygging med relativt få komponenter. Enkel, årlig kalibrering kan utføres på brukerstedet.

TESTER:

NOCOBX

Skåler til prøvetaking på flater for å vise tilstedeværelse av mikroorganismer – og påfølgende effekt av Nocospray-robot.



NOCOSTRIPS

Kolorimetriske strips til kontroll av jevn og tilstrekkelig distribusjon av HPV-gass i behandlet rom.



Bestillingsinformasjon:



Nocospray 2

Art nr. 2000.001



Fjernkontroll

Art nr. 3010.611

Nocospray Kube

Art nr. 2100.001



Desinfeksjonsmidler:



Nocolyse Neutral (6 %)

Art nr. 4000.001-6

Til forebygging og rutinemessig desinfeksjon.



One Shot (12 %)

Art nr. 4010.001-6

Ved påvist smitte eller mistanke om smitte.



Nocolyse Food (7,9 %)

Art nr. 4020.001

Til desinfeksjon av rom/flater som er i kontakt med mat.



Nocolyse, 250 ml

Art nr. 4000.025-6 (6%)

Art nr. 4010.025-6 (12%)

Luktfjernere:



Nocolyse Nocodor (6 %) med eteriske oljer

Art nr. 4030.001

Til desinfeksjon og fjerning av lukt.



Oxydor

Art nr. 4300.001

Luktfjerner.

Insekticider:



Oxypy

Art nr. 4200.001

Til flygende og krypende insekter (også skabbmidd).



Oxypy +

Art nr. 4230.001

Spesielt til veggdyr. Dreper også larvene.

Din forhandler i Norge:

Brage
MEDICAL

Brage Medical AS

Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva

Epost: info@bragemedical.no

Telefon: 32 83 59 00