


BRUKSANVISNING


Nocotest teststripler for kvantitativ påvisning av hydrogenperoksid (H₂O₂) brukes til å kontrollere at biodesinfeksjonsproduktene er jevnt fordelt.



1 Fukt puten på teststripsen med en-to dråper vann.

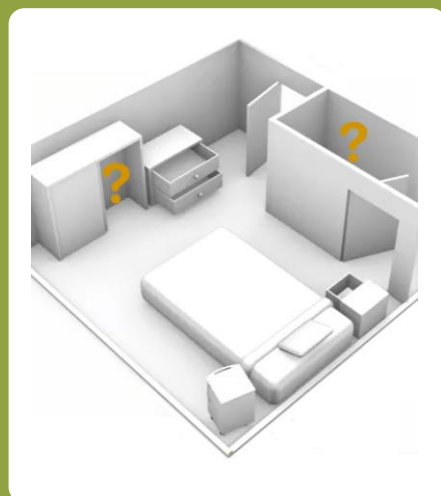

2 Plasser stripsene på steder hvor det er ønskelig å sjekke effekten / distribusjonen av gass.

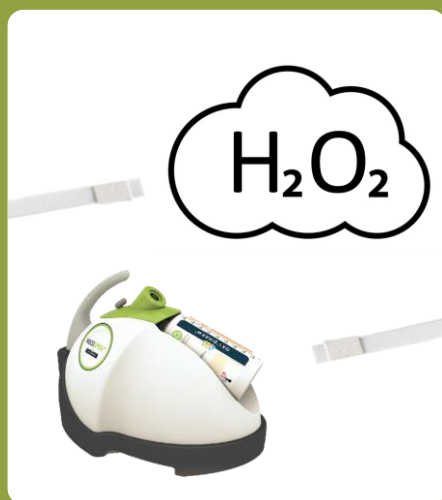

3 La stripsene ligge i rommet under hele desinfeksjonssyklusen



4 Sammenlign den eksponerte stripsen mot fargeskalaen på boksen.